

Základní doporučení a návod k použití – péče o novou zubní náhradu FIXNÍ

Fixní zubní náhradu (rekonstrukce korunky, korunka, fixní můstek ...) je třeba čistit stejně dobře nebo ještě lépe než zuby vlastní. Zásady správného čištění jsou v základu shodné se zásadami správného čištění přirozeného chrupu.

K čištění je třeba zubní kartáček a zubní pasta, doporučené jsou superfloss (speciální zubní nit, jejíž střední část tvoří širší houbovitě vlákno), ústní sprcha a mezizubní kartáčky, jejichž správnými velikostmi se čistí všechny mezizubní prostory chrupu.

K čištění **korunek** je vhodné používat jednosvazkové kartáčky, které efektivně čistí prostor mezi dásní a korunou.

Zubní můstek zpravidla přemostňuje mezeru po chybějících zubech a je fixován nejčastěji na obroušených sousedních pilířových zubech.

Pod můstkem se snadno zachytávají zbytky potravy a zubní plak. Tyto faktory nejčastěji způsobují nepříjemný zápach z úst či krvácení dásní. Nedostatečná hygiena prostor okolo pilířových korunek a pod mezičleny může způsobit vznik parodontitidy. Je tedy důkladně čistit nejen povrch můstku, ale i pilířové zuby a prostor pod můstkem. Lze tak předejít vzniku sekundárních kazů v oblasti krčků pilířových zubů nebo zánětům dásní. K čištění prostor pod můstkem jsou vhodné právě mezizubní kartáčky či superfloss.

Se zásadami správného čištění fixních zubních náhrad, správným výběrem, efektivním a šetrným používáním všech potřebných pomůcek, Vám poradí Váš ošetřující lékař či dentální hygienista.

Poučení: Při výskytu alergické reakce či jiné nežádoucí příhody během používání zdravotnického prostředku kontaktujte svého ošetřujícího zubního lékaře a výrobce, při výskytu závažné nežádoucí příhody kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, výrobce a Státní ústav pro kontrolu léčiv.



Zubní technika, spol. s r.o.
Komenského 182, Kolín 4



Tel.: 321 728 587

www.zubni-technika.cz



Prostředek na zakázku



Identifikační číslo výrobku je uvedeno na přiloženém Prohlášení o zdravotnickém prostředku.